



Мы стремимся помочь людям
с диабетом вести здоровую жизнь

Система непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Linx

Система мониторинга Lumiflex LinX использует инновационный электрохимический метод для точного измерения концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, предоставляя вам полный контроль над вашим здоровьем.

- | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| | Непрерывный мониторинг в течение 16 дней | | Не требует обязательной калибровки |
| | Для взрослых и детей от 2 лет | | Облачный сервис для врачей |
| | Контроль диабета 24/7 | | Подходит для беременных |

В чем основные преимущества Lumiflex?




- | | |
|---|---|
| Аппликатор с предустановленным сенсором | Размер сенсора значительно меньше аналогов, зарегистрированных в РФ |
| Однокомпонентный | Срок службы 16 дней |
| Передача данных через Bluetooth с периодичностью 1 минута | IP 68 погружение на глубину до 2,5м, не более чем на 2 часа |
| Калибровка произведена на заводе, при этом есть функция необязательной калибровки для достижения наилучшей точности измерения | |
| Диапазон 2-25ммоль/л | Возраст 2+ |
| Установка на живот или плечо | Соединение с часами Apple watch |
| Облачная система для врачей | Мониторинг для родителей |
| MARD 7,66% | История данных без ограничений |



Для установки сенсора, выполните следующие шаги:

Шаг 1 Возьмите в руки упаковку системы. Она запечатана дополнительным стикером защиты от вскрытия.

Шаг 2 Поверните и снимите нижнюю крышку аппликатора. Сенсор готов установке.

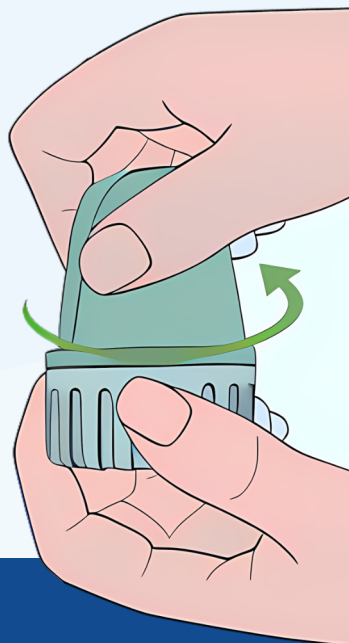

ВНИМАНИЕ! НЕ прикасайтесь к внутренней стороне готового к установке сенсора в аппликатора и не кладите его обратно в упаковку.

Шаг 3 Поместите аппликатор на выбранный уже очищенный и сухой участок кожи, где предполагается установка сенсора.


Шаг 4 Прижмите плотно аппликатор к месту установки, держа его строго перпендикулярно поверхности кожи и прижимая его к телу.

Шаг 5 Нажмите на кнопку аппликатора до хлопка для установки сенсора. Подержите 2-3 секунды для приклеивания пластыря к коже.

Шаг 6 Осторожно отведите аппликатор сенсора от тела строго перпендикулярно. Разгладьте пластырь сенсора на коже.

Шаг 7 Убедитесь, что сенсор надежно закреплен после нанесения.

Примечание: Используйте свой телефон для соединения с сенсором сразу после установки следуя подсказкам в приложении Lumiflex.

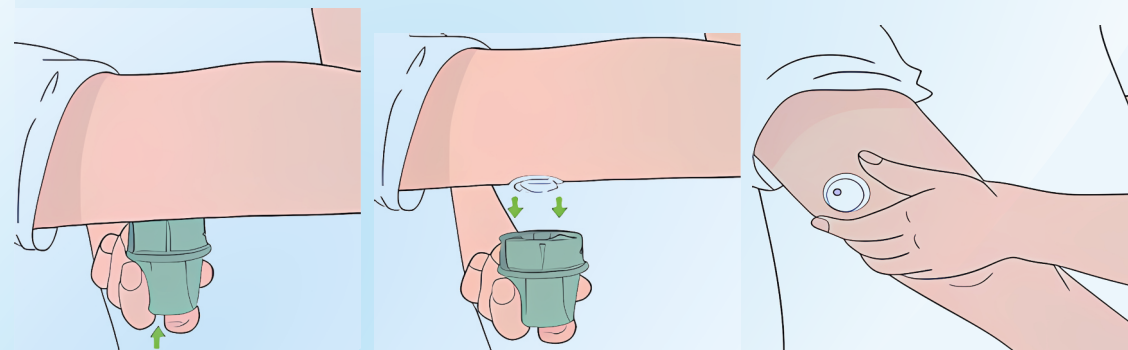



Подключение сенсора к приложению Lumiflex

01 После установки нового сенсора запустите приложение Lumiflex. На главном экране имеется кнопка подключения нового сенсора. Нажмите на неё.

02 После установки сенсора, в разделе подключения нового сенсора, вы увидите ваш сенсор. Проверьте, что серийный номер в приложении и на аппликаторе совпадают.

03 После подключения сенсора в приложении происходит инициализация, и запускается процесс прогрева/подготовки сенсора, который занимает 60 минут, после чего приложение отобразит первые показания уровня глюкозы.

ВНИМАНИЕ: Нельзя прерывать или отменять процесс прогрева/подготовки сенсора.

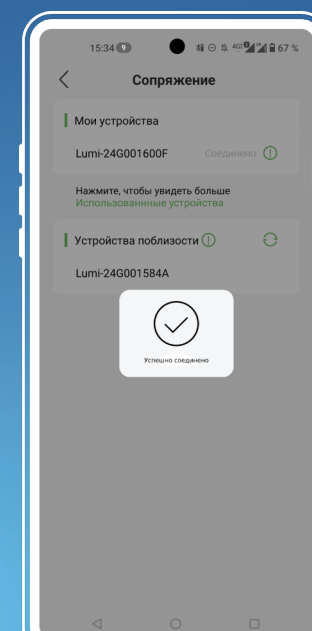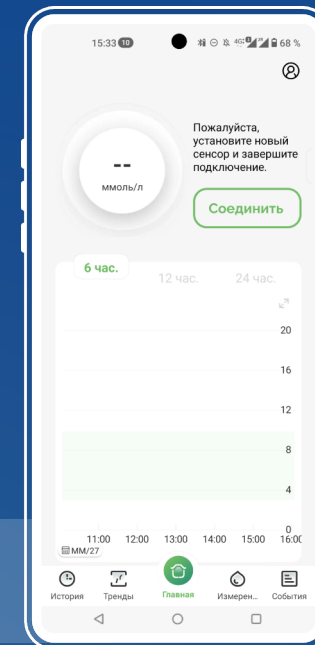

После прогрева сенсора вам будут доступны данные мониторинга глюкозы, а также возможность делиться данными с близкими и лечащим врачом, выгрузка аналитических отчетов и добавление информации о диете, спорте и лечении.

ПРИМЕЧАНИЕ: если телефон не видит установленный сенсор, попробуйте обновить поиск.

Если это не помогает, проверьте настройки приложения и телефона: в телефоне должен быть включен Bluetooth, а приложению должны быть выданы максимальные разрешения.

Для получения более подробной информации о настройке и использовании Lumiflex на нашем сайте: <https://lumiflex.ru>

