
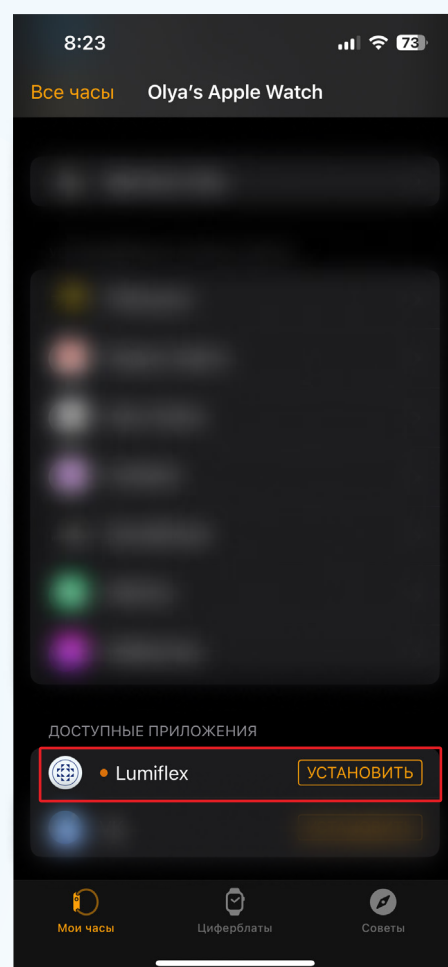




Установка приложения Lumiflex на Apple Watch

Для установки приложения Lumiflex на Apple Watch следуйте пошаговой инструкции ниже

Убедитесь, что ваши Apple Watch подключены к iPhone, на котором установлено приложение Lumiflex LinX для мониторинга глюкозы.

При успешном подключении приложение Lumiflex автоматически отобразится в разделе «Мои часы» приложения Watch на iPhone.

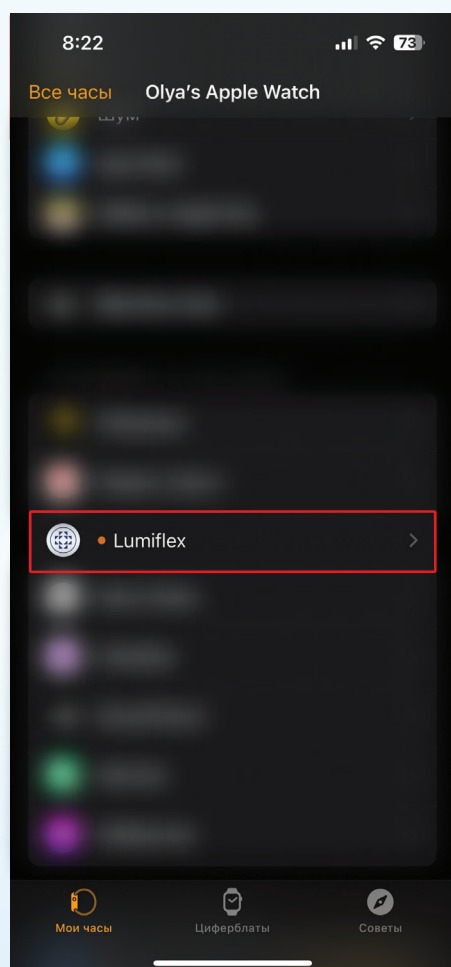

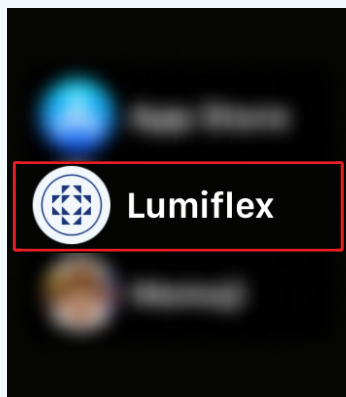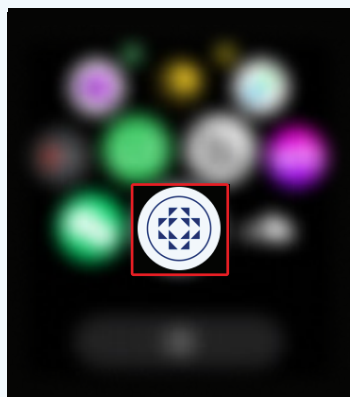

На Apple Watch приложение Lumiflex находится в общем списке установленных приложений.

Удаление приложения

Чтобы удалить приложение, откройте этот же раздел, выберите Lumiflex и перейдите на его страницу — там доступна опция удаления.

При необходимости вы всегда можете повторно установить приложение.

Подключение Apple Watch к системе непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex LinX

Если смартфон находится вне зоны действия системы мониторинга LinX, устройство автоматически подключается к Apple Watch с наиболее стабильным сигналом.


В этом случае часы выполняют синхронизацию данных с облачным хранилищем и приложением Lumiflex на вашем смартфоне.

Мониторинг глюкозы

Коснитесь иконки приложения, чтобы открыть его. Если сенсор не подключён, на экране появится изображение, аналогичное рисунку А.

При активном подключении сенсора в приложении отображаются графики уровня глюкозы за последние 1, 3 и 6 часов (см. рисунки В, С и D).


A

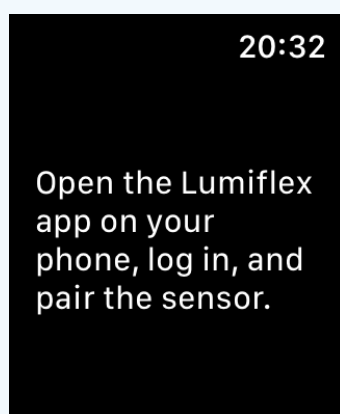


B



C

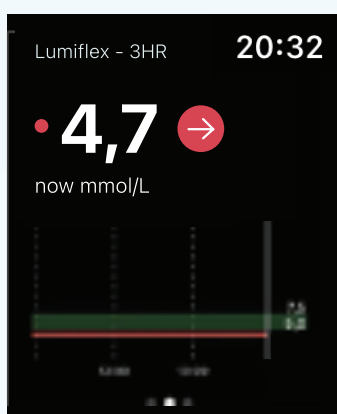


D

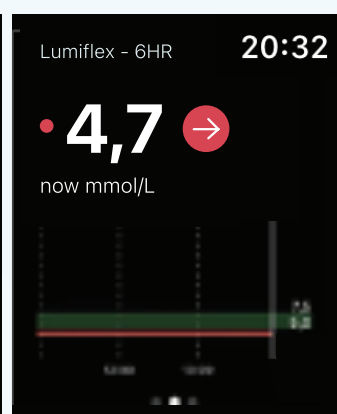

Добавление виджета Lumiflex на циферблат


Вы можете разместить виджет Lumiflex на циферблате часов. В примере используется циферблат «Модульный».

1

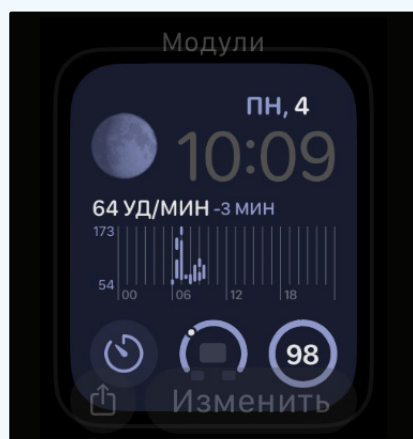


Долгое нажатие для входа в режим редактирования

2

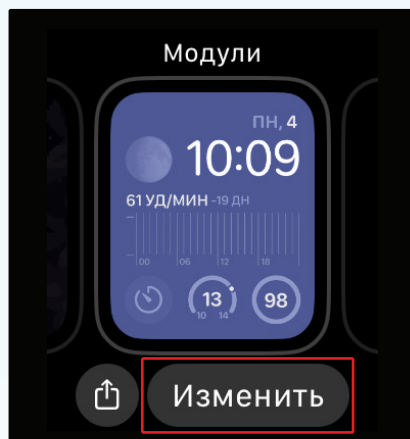


Нажмите для перехода в раздел редактирования виджетов

3

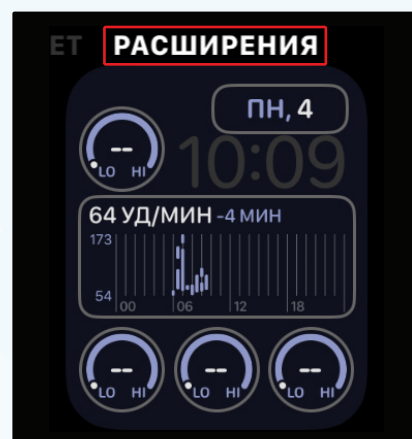


Выберите любой из круглых виджетов и перейдите в список редактирования


4

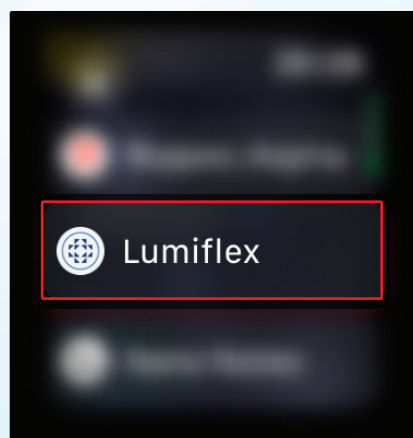

5

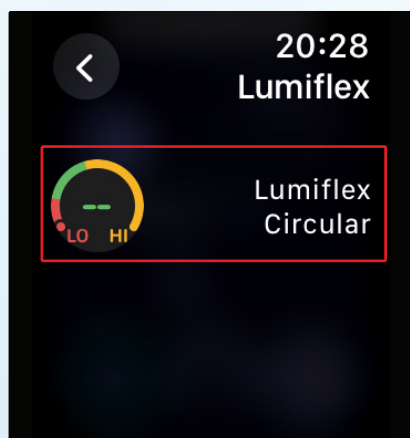

6

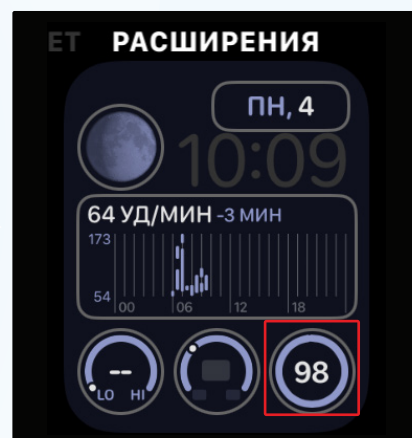

Любой из виджетов можно настроить для Lumiflex, как показано на скриншотах



На текущий момент поддерживается только круглый формат виджета.

Нажмите на виджет на циферблате, чтобы мгновенно открыть приложение Lumiflex.